

# Néogénate

Pasta a base de eugenol para moldagens de edentados totais.



## COMPOSIÇÃO

- Pasta branca a base de óxido de zinco
- Pasta vermelha a base de eugenol.

## PROPRIEDADES

- A pasta rosa obtida pela espatulação das pastas branca e vermelha apresenta uma consistência inicial suficientemente fluida para permitir a reprodução de todas as particularidades da mucosa, cuja impressão deve ser tomada.

Na fase da moldagem funcional, o material é suficientemente plástico para permitir ao dentista, se assim desejar, executar em seu paciente os movimentos bucais necessários para registrar sobre a impressão as diversas inserções musculares.

## INDICAÇÕES E MODO DE USO

- Moldagens Funcionais para edentados totais
- Reembasamento de próteses totais
- Estabilização da placa base durante a tomada da altura de oclusão.

## DOSIFICAÇÃO

- Sobre uma placa de vidro ou bloco de espatulação em papel especial, depositar duas medidas iguais de cada um dos tubos (9 a 11 cm, segundo o tamanho da moldagem).
- Evitar colocar em contato as pastas se a manipulação não for executada imediatamente.

## MANIPULAÇÃO

- Deve ser feita em 30 segundos aproximadamente. Com uma espátula rígida e larga, juntar as duas pastas e misturar cuidadosa e vigorosamente até obter uma cor rosada uniforme.

## MOLDAGEM

- Colocar um pouco de vaselina sobre as comissuras labiais do paciente. Distribuir a mistura obtida em uma moldeira individual. Levar o conjunto a boca a ser trabalhada e assentar ligeiramente para obter uma fluidez perfeita da pasta. Manter sob uma leve pressão durante aproximadamente 1 minuto. Pedir para que o paciente execute os movimentos bucais necessários para moldagem das bridas.

## RETOQUE

- Em caso de defeito local da impressão, remover ao redor do mesmo mais ou menos 1mm e preencher com uma pasta recém espatulada. Reinsere na boca.

## VAZAMENTO DA MOLDAGEM

- Sendo o material volumetricamente estável, o vazamento pode ser postergado.

## APRESENTAÇÃO

- Caixa com 1 tubo de 150g de pasta a base de óxido de zinco e 1 tubo de 62g de pasta a base de eugenol.



SEPTODONT BRASIL LTDA.  
Al. Pucurui, 166 - Tamboré - Barueri - SP  
CEP: 06460-100  
Tel: (11) 4688-0789 - Fax 4689-1577  
E-mail: septodont@septodont.com.br  
<http://www.septodont.com.br>