

A SEPTODONT apresenta mais beleza e organização para seu consultório.



Broqueiros e organizadores de limas MEDIC NRG.

Prevenção de contaminação Cruzada

Tanto a bandeja quanto o cubo, são autoclaváveis. Em adição, existem reservatórios para desinfetantes. Esta combinação, juntamente com a tampa protetora, evitam contaminação cruzada.

Organização da Estação de Trabalho

A bandeja é claramente marcada e separada em áreas designadas para vários tipos de brocas e limas para procedimentos de endodontia. O organizador também possui uma gaveta, para outros acessórios.

Ventilação das ferramentas

A caixa possui uma abertura na parte de trás, facilitando a ventilação, para que as brocas e limas sequem mais rapidamente, evitando corrosões.

Fácil Manutenção

O organizador é fácil de ser desmontado, permitindo a limpeza das peças individualmente.

Conveniente

Sua forma panorâmica permite uma fácil visualização e acesso a cada broca e lima.

MEDICNRG™
Precise Endo Technology



Broqueiros e organizadores de limas MEDIC NRG.


Organizador de Brocas

Instruções de Limpeza

- Remova a bandeja do organizador delicadamente, empurrando a "aba" para trás, na parte superior da bandeja;
- Retire a tampa protetora, puxando os 2 botões laterais que a seguram;
- Tire os acessórios da gaveta;
- Limpe cada parte com um pano umedecido com desinfetante;
- Recoloque as partes retiradas;
- Esteja certo de que a bandeja se prendeu na "aba" do organizador;
- Feche a tampa para prevenir contaminação cruzada.

Instruções para Esterilização

- Remova a bandeja do organizador delicadamente, empurrando a "aba" para trás, na parte superior da bandeja (Atrás do reservatório de desinfetante);
- Coloque a bandeja, juntamente com as brocas na autoclave;
- Ligue a autoclave: 134°C por 5 minutos ou 121°C por 20 minutos;
- Após término da esterilização, retorne a bandeja para o organizador;
- Esteja certo de que a bandeja se prendeu na "aba" do organizador;
- Feche a tampa para prevenir contaminação cruzada.

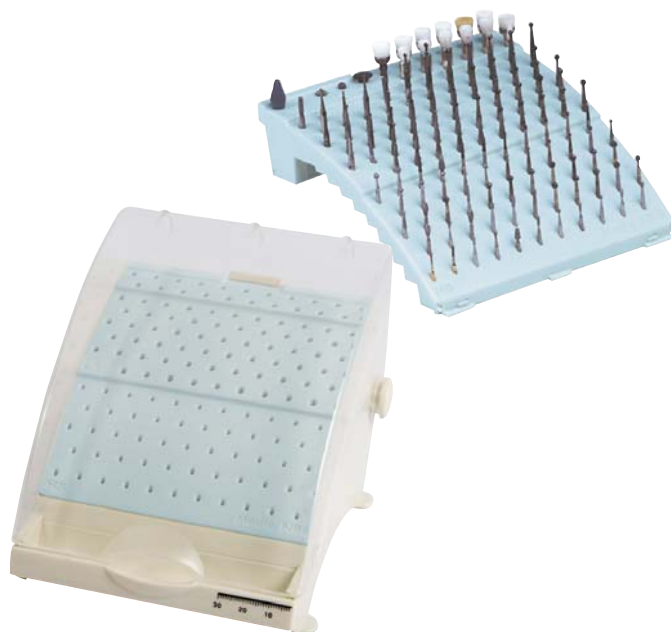

Organizador Endodôntico

Cubo endodôntico

- Autoclavável
- Duas réguas para ajustar o comprimento da lima
- Reservatório para desinfetante de lima
- Removível

Instruções para Esterilização

1. Remova a bandeja do organizador delicadamente, empurrando a "aba" para trás, na parte superior da bandeja (Atrás do reservatório de desinfetante);
2. Coloque a bandeja, juntamente com as brocas e limas na autoclave;
3. Ligue a autoclave: 134°C por 5 minutos ou 121°C por 20 minutos;
4. Após término da esterilização, retorne a bandeja para o organizador;
5. Esteja certo de que a bandeja se prendeu na "aba" do organizador;
6. Feche a tampa para prevenir contaminação cruzada.



Organizador de Limas

Esterilização

Temperatura Máxima: 134°C

Tempo Máximo: 5 minutos

Tempo de secagem: 10 a 15 minutos em autoclave.

É necessário seguir as instruções precisamente, para garantir a segurança no uso do organizador de limas.

Temperaturas superiores a 134°C, podem causar danos ao Plástico.

