

Endopérox

Clareamento de dentes desvitalizados

Cimpat Rosa e Branco

Tradição e Eficiência em Cimento
Provisório à Base de Óxido de Zinco



- Peróxido de Carbamida 100%

INDICAÇÃO

Clareamento de dentes desvitalizados escurecidos (por exemplo: pela hemoglobina)

PROPRIEDADES

O peróxido de hidrogênio com uréia (peróxido de carbamida) desprende oxigênio em presença de líquidos fisiológicos. Esta liberação se dá em meio praticamente neutro. Suas principais propriedades provêm da ação oxidante do oxigênio nascente que é descolorante, bactericida e detergente mecânico por emanação gasosa.

Um frasco faz aproximadamente 75 aplicações.

MODO DE USO

- Antes de qualquer tratamento, verificar a hermeticidade do tratamento endodôntico.
- Limpar a cavidade de acesso.
- Desobturar o canal uns 3mm.
- Selar a obturação endodôntica com um cimento adequado que vede hermeticamente.
- Aplicar na cavidade de acesso ácido fosfórico durante 1 minuto.
- Enxaguar abundantemente com água. Secar.
- Limpar a cavidade de acesso com álcool. Secar.
- Colocar o Endopérox em contato com a superfície vestibular.
- Cobrir com uma bolinha de algodão.
- Selar a cavidade com um cimento impermeável.

Examinar novamente o paciente 4 ou 5 dias após. Se o clareamento já for o suficiente, obturar, caso contrário, se pode repetir o tratamento, que é completamente inofensivo a dentina.

É sempre preferível efetuar o clareamento em várias sessões para não sobrepassar o objetivo que se busca e obter uma descoloração demasiada.

CONSERVAÇÃO

- Conservar em temperatura ambiente.
- Não colocar em geladeira.
- Conservar protegido da luz.
- Fechar bem o frasco depois de usá-lo.

APRESENTAÇÃO

Frasco de 5g.



- Vedação hermética
- Rápido endurecimento
- Melhor adesão à dentina
- Disponível na versão rosa e branco

INDICAÇÕES

- Obturação provisória entre sessões de tratamento endodôntico.
- Curativo de demora para sessões de clareamento de dentes desvitalizados.
- Adequação do meio bucal.

PROPRIEDADES

O cimpat é uma pasta de obturação provisória a base de Óxido de Zinco sem eugenol, o que permite seu uso mesmo antes de restaurações com resinas.

Sua composição com a quantidade adequada de gesso resulta em um material resistente e não friável.

A presa deste material se deve a absorção da água e durante este processo ocorre uma ligeira expansão, proporcionando uma vedação completamente hermética.

Um frasco faz aproximadamente 75 aplicações.

APRESENTAÇÃO

Frascos com 25g.

Cimpat Rosa

Mais duro, resistente a compressão, indicado para dentes posteriores. Removido através de brocas. Durabilidade da restauração de 3 a 4 semanas.

Cimpat Branco

Mais plástico, de fácil manipulação e remoção. Indicado para dentes anteriores, porém também podem ser utilizados em dentes posteriores entre sessões de tratamentos de canal. Removido através de uma sonda exploradora. Durabilidade da restauração de 1 a 2 semanas.



SEPTODONT BRASIL LTDA.
Al. Pucurui, 166 - Tamboré - Barueri - SP
CEP: 06460-100
Tel: (11) 4688-0789 - Fax 4689-1577
E-mail: septodont@septodont.com.br
<http://www.septodont.com.br>