

Endosolv E

Solução desobturadora para retratamento endodôntico



A base de tetracloroetileno. Endosolv E é utilizado para amolecer e facilitar a remoção do material obturador do canal endodôntico. Ao contrário dos outros, age sobre o cimento obturador e não sobre a gutta percha.

INDICAÇÕES

- Remoção de cimento do tipo Óxido de Zinco + Eugenol (Endométhasone N) e à base de Hidróxido de Cálcio (Acroseal).

VANTAGENS

- Amolece rapidamente o material obturador de forma eficiente, prática e segura.
- Evita os riscos de criar um falso canal.

APRESENTAÇÃO

Vidro de 13 ml.

PROCEDIMENTOS

- Abra a câmara pulpar e acesse o canal
- Coloque uma gota de Endosolv E no canal, utilize um instrumento para tirar o material obturador, mergulhe o instrumento no produto toda vez que levar ao canal.
- Repita a operação até a completa remoção do material obturado.
- Irrigue e aspire o conduto até a total remoção do produto.



SEPTODONT BRASIL LTDA.
Al. Pucurui, 166 - Tamboré - Barueri - SP
CEP: 06460-100
Tel: (11) 4688-0789 - Fax 4689-1577
E-mail: septodont@septodont.com.br
<http://www.septodont.com.br>