

# LUMINRG

Cabo para espelho iluminado - Dois em Um

## Introduzindo Iluminação na cavidade oral

Introduz um novo conceito de iluminação intra-oral e conforto para o profissional.



*Awoeiuw o weowieruowiu  
sdfosidfu woeiwueoriwue  
sdfosidfu woeiurwoeriuw sodif  
weoiweuer osidufsoidfusoju*




- Brilhante, com foco de luz
- LED de diferentes cores para múltiplas funções
- Autoclavável
- Compatível com a maioria dos espelhos padrão
- Ângulo e distância ajustáveis com a luz do LED.
- Longa duração do LED
- Bateria facilmente substituível: AAA.
- Ergonômico e fácil de usar
- Preço atrativo.
- Otimiza o desempenho endodôntico.



# LUMINRG

Cabo para espelho iluminado - Dois em Um

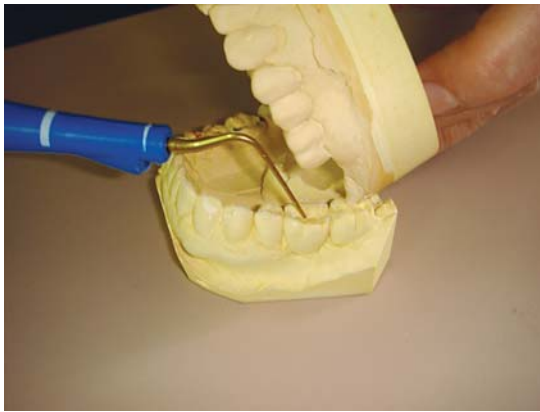

Monomon moonmo monon



Monomon moonmo monon

Introduz um novo conceito de iluminação intra-oral e conforto para o profissional.

**Luz Brilhante:** A simplicidade do dispositivo é brilhante, literal e metaforicamente. O LED com luz iluminadora introduz um novo conceito de iluminação dentro da cavidade oral, possibilitando ao profissional muito mais conforto. Uma luz forte, concentrada e em miniatura que pode reduzir a necessidade de uso do refletor.

**Múltiplas funções:** O LumiNRG pode realizar diferentes funções, usando as diferentes cores de LEDs que podem ser intercaladas. A fim de diagnosticar, trincas e fraturas nos dentes conecte o LED de cor AZUL. O LED de luz BRANCA ou LARANJA pode apoiar o processo de polimerização. A luz BRANCA pode auxiliar a polimerização de forma rápida e a LARANJA de uma forma lenta.

**Ajustável:** O LumiNRG é desenvolvido para ser usado com espelho padrão com ou sem rosca. Com base na nova patente que permite o ajuste do espelho em qualquer ângulo da luz ou profundidade.

**Versátil:** Na dependência do uso do espelho padrão, o LumiNRG também pode ser usado com muitas diferentes dicas ou instrumentos desde que eles tenham um padrão de 3mm de diâmetro de rosca. Pontas de instrumentos podem ser facilmente encaixados no LumiNRG. O ângulo do instrumento utilizado pode ser ajustado para otimizar a fonte de luz.

**Autoclavável:** As pontas com iluminação do LumiNRG podem ser colocadas diretamente na autoclave juntamente com os outros instrumentos odontológicos. Não há necessidade de remover o espelho ou outro instrumento antes da esterilização. O compartimento da bateria e a bateria não podem ser autoclavados.

**Vida Útil:** A intensidade da luz é constante, durante toda a vida útil da bateria, graças a um sistema inteligente que controla e regula o consumo da bateria. O LumiNRG funciona com bateria AAA 1.5V.

**Ergonômico:** A luz do LED direcionada facilita a visualização através do espelho.

**Tamanho Pequeno:** O LumiNRG garante que praticamente nenhum espaço extra será ocupado já no limitado espaço oral e é especialmente útil quando se trabalha sobre os dentes molares.



SEPTODONT BRASIL LTDA.  
Al. Pucurui, 166 - Tamboré - Barueri - SP  
CEP: 06460-100  
Tel: (11) 4688-0789 - Fax 4689-1577  
E-mail: septodont@septodont.com.br  
<http://www.septodont.com.br>