

Septocalcine Ultra

Cimento de Hidróxido de Cálcio para proteção pulpar



Caixa com:

- 1 bloco de espatulação
- 1 tubo de pasta base: 13g
- 1 tubo de pasta catalisadora: 11g

COMPOSIÇÃO

- Pasta A: Butilenoglicol salicilato, óxido de zinco, fosfato de cálcio, excipientes.
- Pasta B: Hidróxido de cálcio, óxido de zinco, N-etiltolueno sulfonamida, excipientes.

INDICAÇÕES

- Forramento de cavidades para proteção pulpar.
- Cimentação provisória de coroas.

PROPRIEDADES

- Septocalcine Ultra é um material auto-polimerizável a base de hidróxido de cálcio, destinado ao recobrimento pulpar direto ou indireto e ao isolamento das cavidades abaixo dos materiais de obturação, cimentos, resinas e outros materiais.
- Septocalcine Ultra atua também como barreira protetora pulpar, favorecendo a formação de dentina secundária.
- A mistura é radiopaca.
- A composição do Septocalcine ultra lhe confere ótima propriedade de difusão.

MODO DE USO

- Colocar medidas iguais da pasta A e B em um bloco de espatulação. Misturar rapidamente com a espátula (10-15 seg) até obter uma pasta homogênea (cor uniforme).
- Com um instrumento de extremidade esférica, introduzir imediatamente na cavidade a mistura obtida. O tempo de presa na boca é de aproximadamente 2 minutos.

ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES DE USO

- Não modificar as quantidades de pasta A e B.
- O tempo de presa depende das condições hidrométricas e da temperatura. Na boca, o tempo de presa é mais curto devido a maior temperatura e a maior umidade.
- Septocalcine Ultra não interfere na polimerização das resinas e em outros materiais de obturação.
- Não trocar as tampas dos tubos das pastas.
- Conservar os produtos a uma temperatura inferior a 25°C.
- Em contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e procurar um oftalmologista.
- O catalizador é corrosivo (contem hidróxido de cálcio). Provoca queimaduras se usado isoladamente, cuidado ao manipular.



SEPTODONT BRASIL LTDA.
Al. Pucurui, 166 - Tamboré - Barueri - SP
CEP: 06460-100
Tel: (11) 4688-0789 - Fax 4689-1577
E-mail: septodont@septodont.com.br
<http://www.septodont.com.br>