

Cimpat Branco e Rosa

Cimento para restauração provisória

Composição

Cimpat Branco - cada 100 g de pasta contém:

| | |
|--|---------|
| Óxido de zinco | 41,1 g |
| Sulfato de zinco | 12,0 g |
| Excipientes q.s.p. | 100,0 g |
| (copolímero vinila adipato de dietilexila e gesso) | |

Cimpat Rosa - cada 100 g de pasta contém:

| | |
|---|----------|
| Óxido de zinco | 42,28 g |
| Sulfato de zinco | 12,00 g |
| Excipientes q.s.p. | 100,00 g |
| (copolímero vinila adipato de dietilexila, gesso e óxido de ferro vermelho) | |

Propriedades

Cimpat é um cimento para restauração provisória pronto para uso. Apresenta-se nas cores branco e rosa.

Cimpat adere à dentina e endurece rapidamente dentro da cavidade. Dilata-se levemente durante o processo de endurecimento e garante uma selagem hermética.

Suas propriedades mecânicas melhoradas garantem uma restauração provisória mais duradoura.

Indicação

Restauração provisória de dentes.

Cimpat Branco: mais plástico que o Cimpat Rosa, sua utilização é mais indicada entre sessões de endodontia.

Cimpat Rosa: mais resistente à força mastigatória. Indicado para restauração de dentes posteriores e necessidade de maior tempo de permanência em boca. Cimpat Rosa também pode ser utilizado para a cimentação provisória de coroas.

Contraindicação

Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

Modo de uso

Uso local somente. Para facilitar a manipulação, usar uma espátula aquecida.

Cimpat Branco

Mais plástico que o Cimpat Rosa, emprega-se de forma geral para restaurações provisórias. Após o tratamento, Cimpat Branco é removido da cavidade com a sonda. Devido a sua consistência um pouco mais frível, Cimpat Branco só deve ser utilizado em obturações de curta duração.

Cimpat Rosa

Pode ser inserido sobre compressas de algodão ou diretamente na base da cavidade.

É igualmente um excelente produto restaurador para uso sobre compressas arsenicais.

Advertências e precauções de uso

Como todos os materiais de obturação, Cimpat permanece no seu local somente se a cavidade estiver adequadamente preparada.

Cimpat pode amolecer durante a sua colocação devido à presença de certos solventes nos líquidos ou pastas usadas no tratamento endodôntico. Por isso, após qualquer tratamento endodôntico e antes do preenchimento com Cimpat, requer-se a limpeza e secagem cuidadosas da cavidade.

Conservação

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C, ao abrigo da luz e umidade.

Apresentação

Caixa contendo:

- 1 frasco de pasta branca: 25 g ou
- 1 frasco de pasta rosa: 25 g

Validade: 30 meses após a data de fabricação

Uso Profissional.

Registro ANVISA nº: 10291220087

Responsável Técnico:

Taís Cúgola Coelho Pereira
CRF-SC 13.884

Importado e Distribuído no Brasil por:

TDV Dental Ltda
CNPJ: 81.591.786/0001-60
Rua XV de Novembro, 9944 - Testo Central
CEP 89107-000 Pomerode - SC - Brasil
SAC: (47) 3395-6115
AFE ANVISA: 1.02.912-2

Fabricado por:

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - França

