

Septoject XL

Agulhas gengivais estéreis de uso único

Modo de utilização

- Romper o lacre da capa plástica, girando as extremidades em sentido oposto;
- Retirar a tampa que protege a parte posterior da agulha e rosquear na seringa;
- Remover a outra parte da capa protetora com um movimento suave e proceder com a injeção.
- Finalizado o procedimento, desrosquear a agulha com cuidado. A parte plástica protetora pode ser utilizada para facilitar a remoção da agulha da seringa.
- Descartar a agulha em coletor apropriado para perfurocortantes.

Conselhos para as primeiras utilizações

Movimentos realizados com forte pressão pode causar a quebra da agulha; Evitar movimentos bruscos, extremos ou repetidos durante a injeção para evitar o risco de quebra da agulha;
Não reencapar a agulha com o uso das mãos;
Não dobrar ou quebrar a agulha;
Não utilizar o produto com data de validade vencida;
Não utilizar o produto caso a embalagem da capa protetora esteja rompida;
A não observância de tais advertências é de responsabilidade do profissional.

Apresentação

Contém 100 unidades de agulhas gengivais estéreis de uso único.

Conservação

Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente.

VALIDADE: 60 meses a partir da data de esterilização indicada na embalagem.

PRODUTO ESTÉRIL
USO ÚNICO
PROIBIDO REESTERILIZAR

Uso profissional

Registro ANVISA N° 10291220080

Responsável Técnico:
Taís Cúgola Coelho Pereira
CRF-SC: 13.884

Importado e Distribuído no Brasil por:

TDV Dental Ltda
CNPJ: 81.591.786/0001-60
Rua XV de Novembro, 9944 - Testo Central
CEP 89107-000 Pomerode - SC - Brasil
SAC: (47) 3395-6115
AFE ANVISA: 1.02.912-2



Fabricado por:
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - França

