

Endosolv permite o amolecimento tanto de cimentos tradicionais de eugenol e  xido de zinco quanto de resina fen lica.

### Composiç o:

Acetato de etila, acetato de amila e timol.

### Propriedades:

Devido   sua composiç o, Endosolv permite o amolecimento tanto de cimentos tradicionais de eugenol e  xido de zinco quanto de resina fen lica.

### Indicaç o:

Indicado para remoç o de cimentos endod nticos   base de  xido de zinco e eugenol e   base de resina fen lica.

### Contra-indicaç es:

Hipersensibilidade aos componentes da f rmula.

### Eventos adversos:

Rea o al rgica.

### Instru es de uso:

O campo de opera o deve ser completamente isolado: recomenda-se a utiliza o de um dique de borracha em torno do dente, como em todo procedimento de canal radicular. Limpar mecanicamente a c mara pulpar e a entrada dos canais. Colocar algumas gotas de Endosolv num recipiente adequado antes de colocar uma gota de Endosolv no interior da c mara. Limpar o canal utilizando primeiro uma sonda e depois um escavador, sempre mergulhando a ponta do instrumento no Endosolv antes de inseri-lo no canal. Caso perceba alguma resist ncia, o instrumento deve ser retirado do canal e limpo. Repetir a opera o v rias vezes, at  atingir o  pice. A irriga o peri dica com hipoclorito de s dio   eficaz para a neutraliza o do meio.

**Advert ncias, precau es e restri es:** O dente tratado com Endosolv deve estar completamente limpo e seco antes de uma nova obtura o, especialmente quando se utiliza um cimento a base de  xido de zinco e eugenol como novo material obturador. Uso profissional.

\*PERIGO



\* L quido e vapores altamente inflam veis.

\* Provoca irrita o ocular grave.

\* Pode provocar sonol ncia ou vertigem

Cont m acetato de etila. Mantenha afastado do calor/fa sca/chama aberta/superf cies quentes. – N o fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transfer ncias. Utilize equipamento el trico/de ventila o/de ilumina o/...  prova de explos o. Utilize apenas ferramentas antifa scantes.

Evite o ac mulo de cargas eletrost ticas. Use luvas de prote o/roupa de prote o/prote o ocular/prote o facial. Em caso de inc ndio: Para a extin o, utilize Extintores com P  Qu mico Seco – Classe B. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enx gue a pele com  gua/ tome uma ducha. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enx gue cuidadosamente com  gua durante v rios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for f cil. Continue enxaguando. Caso a irrita o ocular persista: consulte um m dico. EM CASO DE INALA O: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi o que n o dificulte a respira o. Lave cuidadosamente ap s o manuseio. Descarte o conte do/recipiente conforme legisla o vigente. Consultar a Ficha de Informa es de Seguran a.

**Armazenamento:** Armazenar em temperatura inferior a 25 C, em local seco, fresco, bem ventilado e ao abrigo da luz solar.

### Apresenta o:

Refer�ncia	C�digo	Conte�do
1312P	0013125020	Endosolv – 13ml

**Validade:** 36 meses ap s a data de fabrica o.

### Uso Profissional

TDV Dental Ltda  
CNPJ: 81.591.786/0001-60  
Rua XV de Novembro, 9944 - Testo Central  
CEP 89107-000 Pomerode - SC - Brasil  
(47) 3395-6115 | 0800 47 1020  
AFE ANVISA: 1029122



ONU 1993  
Registro ANVISA n : 10291229003  
Respons vel T cnica:  
Ta s C gola Coelho Pereira  
CRF/SC 13.884