

# Detartrine

## Pasta para polimento e profilaxia

---

### Composição

Sílica.....	55 g
Excipientes q.s.p. ....	100 g

### Propriedades

Detartrine é uma pasta cor de rosa de sabor agradável, a base de sílica a qual possibilita a completa remoção do tártaro após a utilização de curetas ou ultrassons, puramente mecânica sem desgaste do esmalte dental.

As essências incorporadas em Detartrine produzem uma sensação de frescor. Além desta propriedade, possui um ligeiro poder antisséptico capaz de atenuar a irritação causada pela ação mecânica exercida sobre a gengiva.

### Indicação

Detartrine apresenta-se sob a forma de pasta, pronta para uso. Indicada para polimento de dentes após a eliminação do tártaro, para eliminação de manchas causadas pelo tabaco e alimentos e polimento de restaurações de resinas compostas.

### Contraindicação

Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

### Modo de uso

Com uma espátula, retirar a quantidade necessária de pasta e revestir a escova ou disco de feltro. Aplicar sobre dentes ou restauração.

Nota: pode-se enxaguar a boca durante ou no final do tratamento.

### Advertências e precauções de uso

Risco de alergia ao formaldeído.

Recomenda-se a utilização de vestuário e luvas adequadas.

### Conservação

Conservar em temperatura ambiente.

### Apresentação

Caixa contendo:

- 1 pote de pasta: 45 g

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação

### ***Uso Profissional***

Registro ANVISA nº: 10291220079

Responsável Técnico:

Taís Cúgola Coelho Pereira - CRF-SC: 13.884

### **Importado e Distribuído no Brasil por:**

TDV Dental Ltda

CNPJ: 81-591-786/0001-60

Rua XV de Novembro, 9944 - Testo Central

CEP 89107-000 Pomerode - SC - Brasil

SAC: (47) 3395-6115

AFE ANVISA: 1.02.912-2